

預防勝於治療


PICO適用於術後切口⁶

病人相關風險因子¹⁰

- 肥胖BMI ≥ 40 kg/m²
- 抽菸
- 過瘦 ≤ 18 kg/m²
- 糖尿病
- 營養不佳
- 免疫抑制
- 高齡者
- 近期接受放射線治療
- 先前手術曾傷口感染

手術相關風險因子¹⁰

- 感染傷口再次手術
- 創傷軟組織嚴重受損
- 植入物手術
- 污染性/感染性傷口
- 骨材植入物外露
- 緊急手術
- 高張力切口

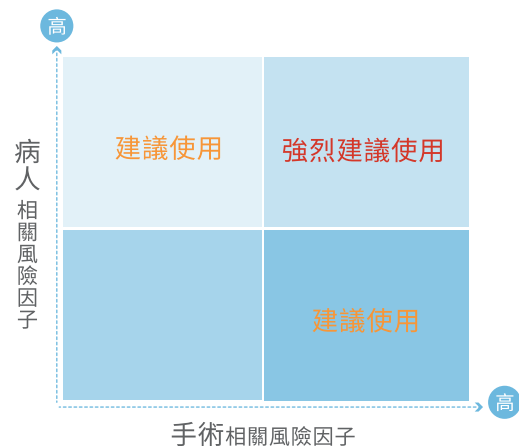

✓ 出現2項以上的風險因子
強烈建議使用PICO預防術後傷口合併症發生

有效降低術後傷口合併症

縮短傷口癒合的時間⁶



使用PICO切口



使用傳統敷料切口

主動式照護⁷⁻⁹


- 降低感染率63%
- 降低側邊張力69%
- 降低裂開率30%
- 降低血清腫77%
- 提升周圍血流44%
- 提升傷口癒合率
- 緩解傷口疼痛感

被動式照護¹¹

- 深層切口感染
- 血液循環不佳壞死
- 局部腫脹情形
- 傷口周圍疼痛
- 傷口裂開延遲癒合
- 延長住院天數

何時需要更換敷料？


敷料未吸滿狀況下，使用可長達7天
若滲液量多導致敷料吸滿，請視儀器燈號更換敷料

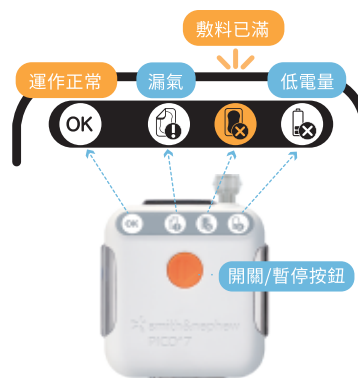

PICO適用於各科切口


整形外科

取腹部皮瓣部位¹

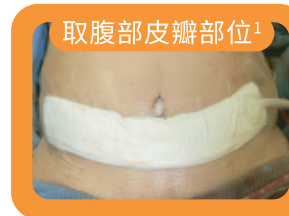


心臟血管外科

冠狀動脈繞道術²

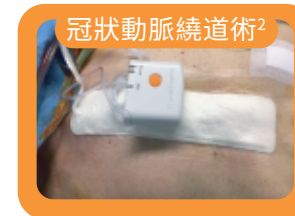

骨科

膝關節置換術³

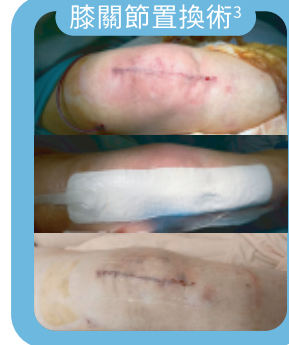

阿基里斯腱斷裂



大腸直腸外科

關造口術⁴



腹腔鏡⁵



腹部切開術⁵




產品特色¹²



- ✦ 口袋式週拋負壓治療機
- ✦ 使用2A鹼性電池無需充電
- ✦ 一鍵啟動負壓傷口治療功能
- ✦ 直覺式辨認治療機運作狀態
- ✦ 無需換罐輕巧方便攜帶外出

AIRLOCK[◇] 技術 獨家專利優化負壓效果

- ✓ 白色敷料
利於觀察滲液性質
- ✓ 20% 敷料吸收
- ✓ 傷口滲液
80% 空氣蒸發

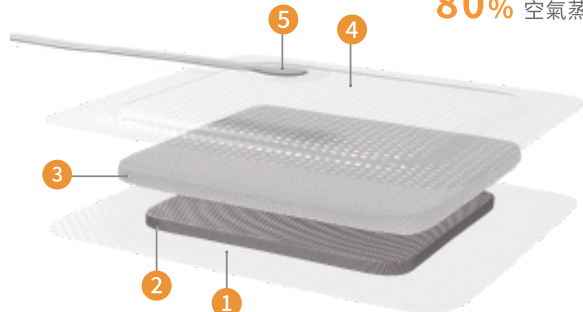

1 矽膠傷口接觸層

移除敷料時降低疼痛感，適用於敏感性肌膚

2 專利AIRLOCK技術層

平均分佈負壓(80mmHg)及分散滲液

3 超強吸收層

有效吸收滲液300ml，防回滲技術

4 水蒸氣散發頂膜層

傷口滲液蒸發，隔絕外在環境避免感染，防水可淋浴

5 PICO軟管

柔軟材質排液管，可壓折不阻塞

產品規格

PICO 7 | 7天使用包

敷料	規格	產品型號
	10cm x 20cm	66802012
	10cm x 30cm	66802013
	10cm x 40cm	66802014
	15cm x 20cm	66802016
	15cm x 30cm	66802017
	15cm x 15cm	66802015
	20cm x 20cm	66802018

PICO 14 | 14天使用包

	10cm x 20cm	66802042
	10cm x 30cm	66802043
	10cm x 40cm	66802044
	15cm x 20cm	66802046
	15cm x 30cm	66802047
	15cm x 15cm	66802045
	20cm x 20cm	66802048

資料來源

- Saunders, C., et al. (2020). BJS Open 5(1).
- Robu, M., Rădulescu, B., Margarint, I., Ştiru, O., Antoniac, I., Gheorghijă, D., Voica, C., Nica, C., Căcoveanu, M., Iliuță, L., Iliescu, V. A., & Moldovan, H. (2023). Journal of Cardiovascular Development and Disease, 10(11), 457.
- Chau, WW., Lo, K.CH., Lau, L.C.M. et al. (2023). BMC Musculoskelet Disord 24, 351.
- Shirakawa, C., Sakamoto, Y., Ueki, S., Shomura, H., Kazui, K., & Taketomi, A. (2025). Journal of wound care, 34(2), 106–110.
- Selvaggi, F., Pellino, G., Sciaudone, G., Corte, A. D., Candilio, G., Campitiello, F., & Canonico, S. (2014). Surgical technology international, 24, 83–89.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2024). MTG43 evidence review decision: <https://www.nice.org.uk/guidance/mtg43/evidence/review-decision-february-2024-pdf-13314467629>
- Loveluck, J., Copeland, T., Hill, J., Hunt, A., & Martin, R. (2016). Eplasty, 16, e20.
- Innocenti, M., Santini, M., Dreasel, E., Martin, R., Melita, D., Colombini, B., & Innocenti, A. (2019). Journal of reconstructive microsurgery, 35(3), 189–193.
- Hudson, D. A., Adams, K. G., Van Huyssteen, A., Martin, R., & Huddleston, E. M. (2015). International wound journal, 12(2), 195–201.
- Hurd, T., Kirsner, R. S., Sancha-Insenser, J. J., Fumarola, S., Garten, A., Patel, M., McCartney Messenger, L., & Diaz-Garcia, R. J. (2021). Wounds : a compendium of clinical research and practice, 33(suppl 2), S1–S11.
- Saunders, C., Nherera, L. M., Horner, A., & Trueman, P. (2021). BJS open, 5(1), zraa003.
- Malmström, M., Huddleston, E., Martin, R. Eplasty. 2014 Apr 2;14:e15

健宇醫療器材股份有限公司
免付費專線 0800-211-346
僅供內部教育訓練使用



+ PICO[◇] sNPWT Smith+Nephew

英國傷口照護領導品牌

史耐輝

掌上型負壓傷口治療機

-80mmHg有效舒適

ZERO ZERO
PRESSURE VENOUS
ULCER RECURRENCE
INCIDENCE
ZERO DELAYS
IN WOUND HEALING
ZERO SURGICAL SITE
COMPLICATIONS
ZERO PRESSURE IN WOUND
ULCER HEALING
INCIDENCE
ZERO ZERO

輕巧
負壓照護

加速
傷口康復

CLOSER
TO ZERO



※每組Pico套組皆附有OP-site，內含丙烯酸成分，如對醫療膠帶過敏者，請勿使用。

衛部醫器輸字第025975號